

# Kom i gang med Q-interactive

## Q-interactive Oppstartsguide




Her finner du instruksjoner som vil hjelpe deg med å installere Q-interactive Assess-appen, konfigurere innstillinger på begge iPad-enheter, ferdigstille påloggingen og opprette øvelsestester. Vi anbefaler deg å øve deg på testadministrering før du går over til testing med ekte testpersoner. Sjekk også gjerne informasjon og supportmaterieell på vår hjemmeside [www.pearsonclinical.no](http://www.pearsonclinical.no), og ta kontakt med våre produktspesialister hvis du har spørsmål.

### DEL 1: Last ned Assess-appen


Q-interactive Assess-appen skal lastes ned til begge iPadene for at du vil kunne bruke systemet.

### TRINN 1

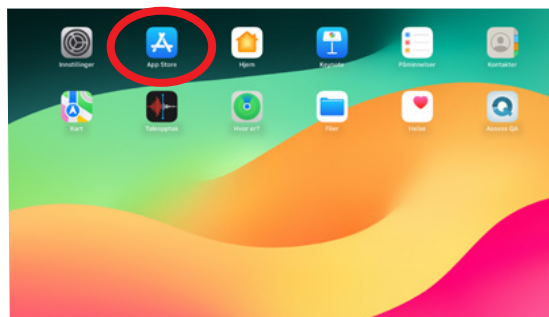

Åpne App Store du finner på startskjermen på din iPad.

### TRINN 2

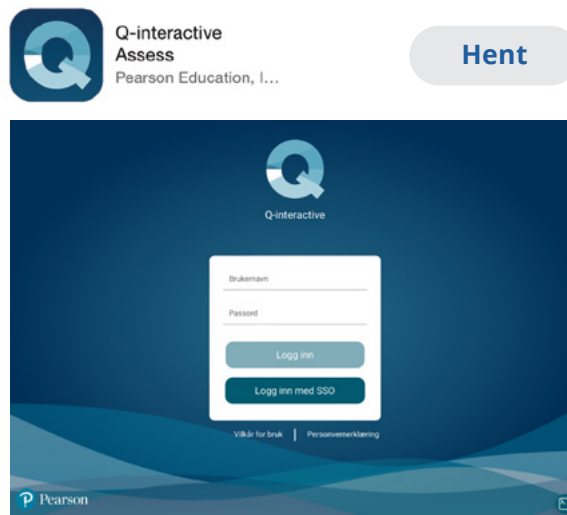

Søk etter Q-interactive og trykk på "Hent"


## DEL 2: Konfigurer iPadene

Når Assess-appen er lastet ned, bør du konfigurere innstillingene på begge enhetene.

Dette steget er viktig av flere årsaker:

- Tilkobling av iPadene, slik at de kan kommunisere med hverandre på riktig måte.
- Presentasjon av stimuli på standardisert måte.
- Sømløs fungering av Q-interactive under testadministrering.
- Eliminering av avbrytelser som kan oppstå under testingen.

### TRINN 1

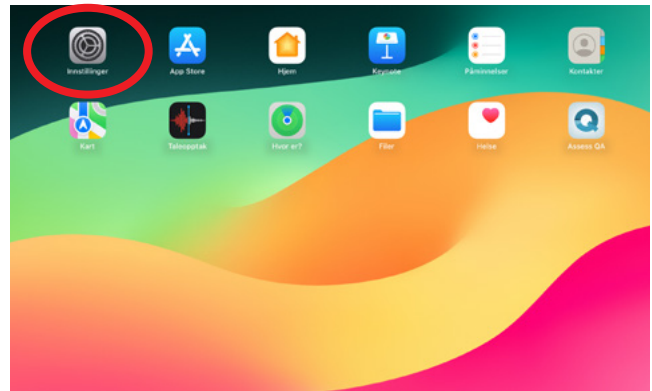

Trykk på Innstillinger på startskjermen.

### TRINN 2


Konfigurer dine iPader i tråd med informasjonen i tabellen under. Q-interactive Assess bruker Wi-Fi til å koble testleders iPad til testpersons enhet. Du skal være tilkoblet et aktivt Wi-Fi-nettverk under synkronisering av iPaden, blant annet for å se tester som er sendt til Assess i forkant av administreringen, og for å hente ut testresultater i etterkant. Du trenger ikke å være tilkoblet et aktivt Wi-Fi-nettverk under selve testadministreringen, men Wi-Fi må være aktivert på begge iPadene.

Testleders iPad	Testpersons iPad	Innstilling	Funksjon	Alternativ
•	•	Wi-Fi	Slå på	Velg et nettverk
•	•	Generelt	Tastatur	Slå av Automatisk stor bokstav
•	•	Generelt	Tastatur	Slå av Autokorrigerings
	•	Skjerm og lysstyrke	Lysstyrke	Skyv knappen helt til høyre
	•	Skjerm og lysstyrke	Night Shift	Slå av
	•	Skjerm og lysstyrke	True Tone	Slå av
•	•	Skjerm og lysstyrke	Autolås	15 minutter
	•	Tilgjengelighet	Skjerm og tekststørrelse	Slå av Reguler lysstyrke automatisk

## DEL 3: Opprettelse av en testing

Velkomstmilen er viktig ved oppstarten, da den hjelper deg med å sette opp dine påloggingsopplysninger. Hvis du allerede har tilgang til Q-interactive, trenger du ikke å motta en ny velkomstmil, men kan fortsette å bruke dine eksisterende påloggingsopplysninger også med den nye Assess-appen.

### TRINN 1

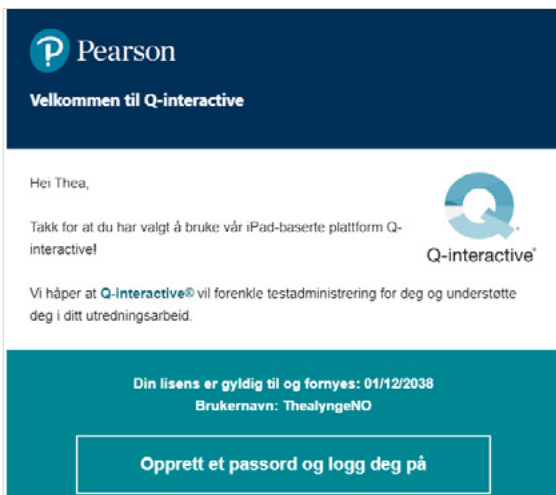

Bruk knappen fra velkomstmilen for å opprette ditt passord til Q-interactive.


Etter at du har opprettet passordet og godkjent lisensvilkårene for Q-interactive, er du klar til å opprette en øvelsestest.

### TRINN 2



Fra fanen Kontrollpanel klikker du på knappen "Øvelsestester". Opprett profilen til en Øvelse-testperson og deretter lagre den nye øvelsesprofilen.

### TRINN 3

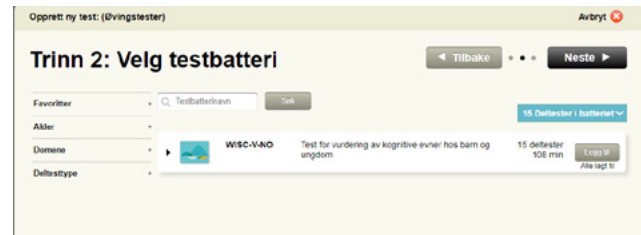

Velg testbatteriet du ønsker å øve deg på ved å klikke på knappen "Legg til" til høyre for det valgte batteriet, og deretter på knappen Neste øverst til høyre.

### TRINN 4



Angi planlagt testdato og testtid og klikk på knappen "Fullfør" øverst til høyre.


### TRINN 5



Klikk på knappen "Send til iPad" til høyre for øvelsestesten. Du er nå klar til å logge deg på i Padene!


**TRINN 6**

For å starte testingen logger du deg på begge iPadene med dine gjeldende påloggingsopplysninger (brukernavn og passord).

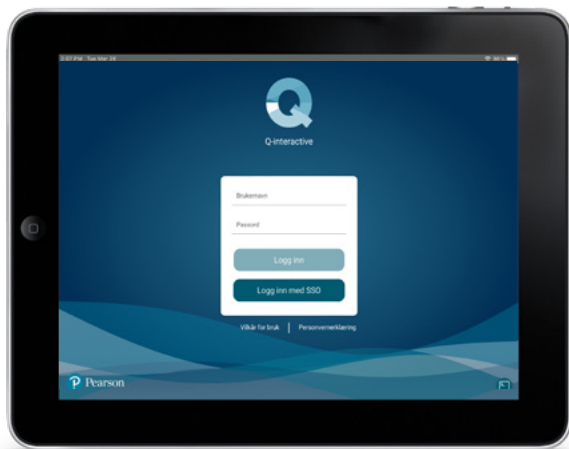**TRINN 7**

Oppi ditt brukernavn og ditt passord. Tillat 10-20 minutter for nedlasting av innholdet til begge iPadene.

Hvis dine iPader er konfigurert på riktig måte (se DEL 2 ovenfor), vil de kobles til hverandre når du starter testingen.

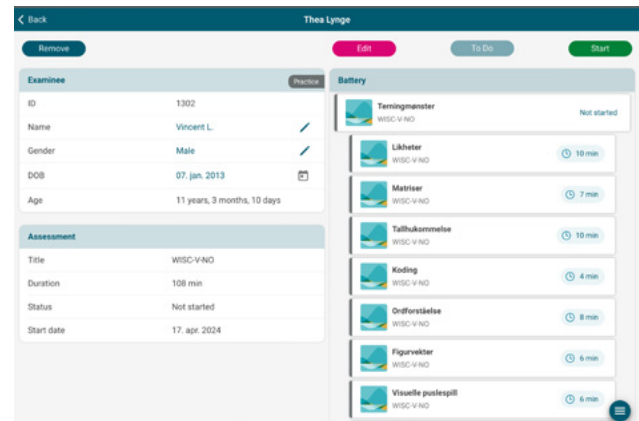**TRINN 8**

Trykk på knappen "Start" for å begynne å administrere testen. Øvelsestester har de samme funksjonene som "ekte" tester, bortsett fra at alle skårer vises som 0.

**Du er nå klar til å bruke Q-interactive. God testing!**

67 57 31 19 | Pearsonclinical.no

Copyright © 2024 Pearson Education, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Pearson and Q-interactive are trademarks, in the US and/or other countries, of Pearson plc.